

## Bedienungsanleitung

Liebe Patientin, lieber Patient,


Ihr Arzt hat Ihnen ein neues Inhalationsgerät verschrieben. Es heißt Novolizer® und ist besonders einfach und sicher zu bedienen. Der Vorteil dabei: Sie sehen, hören und schmecken es, ob Sie richtig inhaliert haben. Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie in der Packung Ihres Novolizer®.



### Vorbereitung des Novolizer®:



1. Die Patrone aus der Schutzdose nehmen.

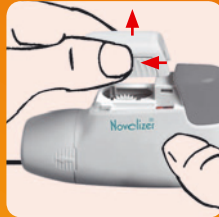

2. Den Deckel an den geriffelten Flächen leicht zusammen drücken, von der farbigen Taste abrücken und nach oben abnehmen.



3. Die Patrone so einsetzen, dass das Zahlenfenster zum Mundstück zeigt.



4. Den Deckel von oben in die seitlichen Führungen setzen und in Richtung farbige Taste schieben.

### Inhalieren mit dem Novolizer®:



1. Die Schutzkappe vom Mundstück entfernen.



2. Die Dosiertaste einmal kräftig herunter drücken. Das Kontrollfenster ändert die Farbe von Rot nach Grün. Dann die Dosiertaste loslassen.



3. Tief ausatmen, dabei nicht in das Gerät atmen, mit dem Mund das Mundstück umschließen und mit einem kräftigen Atemzug einatmen. Wenn Sie korrekt inhaliert haben, hören Sie ein „Klick“ und das Kontrollfenster zeigt wieder die Farbe Rot.

## Patronenwechsel:



Wenn vorne am kleinen Zahlenfenster eine schraffierte Null erscheint, muss eine neue Patrone eingesetzt werden (s. Vorbereitung des Novolizer®).



## So wird der Novolizer® gereinigt:



1. Schutzkappe abnehmen und das Mundstück entfernen. Drehen Sie das Mundstück dazu kurz gegen den Uhrzeigersinn und nehmen es dann ab.



2. Den Novolizer® auf den Kopf drehen und den Dosierschlitten zuerst nach vorn und dann nach oben abziehen.

Reinigen Sie bitte das Mundstück, den Dosierschlitten und das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien und trockenen Tuch. Pulverreste im Gerät können Sie durch leichtes Ausklopfen entfernen.

## Wichtig! Bitte keine Reinigungsmittel oder Wasser für die Pflege verwenden.



3. Anschließend den Dosierschlitten schräg von oben einsetzen und in seine Position drücken.



4. Das Mundstück mit dem Stift links in die Aussparung setzen und bis zum Einrasten und bis zum Einrasten nach rechts drehen.

## Wie oft müssen Sie inhalieren?

morgens: \_\_\_\_\_ abends: \_\_\_\_\_

Bei Bedarf an weiteren Bedienungsanleitungen  
in Kurzform bitte die beigefügte Antwortkarte  
ausfüllen und an uns zurücksenden.

**MEDA**

Bitte hier abtrennen

Ich möchte den Abreißblock  
„Bedienungsanleitung für den  
Novolizer® von MEDA“  
nachbestellen.

Bitte  
freimachen

Absender/Stempel

Antwort

**MEDA Pharma GmbH & Co. KG**  
**Marketing & Sales Deutschland**  
**Novolizer Team**  
**Benzstraße 1**  
**61352 Bad Homburg**