

Instrukcja obsługi



Szanowny Pacjencie,


Twój lekarz przepisał Ci nowy inhalator. Nazywa się Novolizer® i jest szczególnie łatwy i bezpieczny w obsłudze.

Dzięki niemu ocenisz wizualnie, akustycznie i smakowo, czy inhalacja przebiegła pomyślnie. Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w opakowaniu Novolizera®.

Przygotowanie Novolizera®:



1. Wyjąć nabój z pojemnika ochronnego.

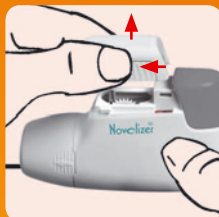

2. Lekko ścisnąć rowkowane powierzchnie pokrywki, odsunąć ją od kolorowego przycisku i zdjąć do góry.



3. Włożyć nabój w taki sposób, aby okienko licznika było zwrócone do ustnika.



4. Włożyć pokrywkę od góry do bocznych prowadnic i przesunąć w kierunku kolorowego przycisku.

Inhalacja za pomocą Novolizera®:



1. Zdjąć nasadkę ochronną z ustnika.



2. Mocno nacisnąć przycisk dozujący. Okienko kontrolne zmienia kolor z czerwonego na zielony. Zwolnić przycisk.



3. Zrobić głęboki wydech, nie kierując go w stronę urządzenia. Włożyć ustnik do ust, obejmując go wargami i wziąć mocny wdech. Prawidłowy przebieg inhalacji jest sygnalizowany „kliknięciem” i zmianą koloru okienka kontrolnego na czerwony.

Wymiana naboju:



Gdy z przodu w małym okienku licznika w zakreskowanym polu pojawia się liczba zero, należy włożyć nowy nabój (patrz Przygotowanie Novolizera®).



Czyszczenie Novolizera®:



1. Zdjąć nasadkę ochronną i usunąć ustnik. W tym celu obrócić nieco ustnik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdjąć.



2. Obrócić głowicę Novolizera® i zdjąć nasadkę dozującą najpierw do przodu, a następnie do góry.

Regularnie czyścić ustnik – nasadkę dozującą i obudowę miękką, suchą ściereczką, nie pozostawiającą włókien. Pozostałości proszku w urządzeniu można usunąć lekko wytrząsając.

Ważne! Do konserwacji przyrządu nie wolno używać żadnych środków czyszczących ani wody.



3. Włożyć nasadkę dozującą skośnie od góry i docisnąć we właściwej pozycji.



4. Włożyć ustnik z kołkiem po lewej stronie do wybrania i obrócić w prawo do zatrzaśnięcia.

Jak często musisz wykonywać inhalację?

rano: _____ wieczorem: _____

Bei Bedarf an weiteren Bedienungsanleitungen
in Kurzform bitte die beigefügte Antwortkarte
ausfüllen und an uns zurücksenden.

MEDA

Bitte hier abtrennen

Ich möchte den Abreißblock
„Bedienungsanleitung für den
Novolizer® von MEDA“
nachbestellen.

Bitte
freimachen

Absender/Stempel

Antwort

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Marketing & Sales Deutschland
Novolizer Team
Benzstraße 1
61352 Bad Homburg