

## Инструкция по применению


Уважаемый пациент!

Врач прописал вам новый ингалятор. Он называется Novolizer®, очень прост и надежен в использовании.

Его преимущества: правильность использования можно контролировать по вкусовым и звуковым ощущениям, а также визуально. Подробная инструкция по применению ингалятора находится в упаковке ингалятора Novolizer®.



### Подготовка ингалятора Novolizer® к использованию:

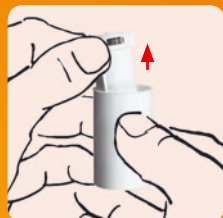

1. Вынуть патрон из упаковки.



2. Легко сожмите рифленные поверхности крышки с двух сторон, отодвиньте от цветной кнопки и приподнимите вверх.



3. Вставьте патрон так, чтобы окно с цифрами было направлено в сторону мундштука.



4. Вставьте крышку сверху в боковые направляющие и сдвиньте ее в сторону цветной кнопки.

### Ингаляция с помощью Novolizer®



1. Снимите защитный колпачок с мундштука.



2. Нажмите дозирующую кнопку с усилием вниз один раз. Контрольное окошко меняет цвет с красного на зеленый. После этого отпустите дозирующую кнопку.



3. Глубоко выдохните (но не выдыхайте!), ставьте мундштук в рот, плотно сомкните губы и сделайте один глубокий вдох. При правильном вдохе слышен щелчок, и в контрольном окошке снова появится красный индикатор.

Щёлк!

## Смена патрона:



Появление в цифровом окне на передней панели символа "0" на затемненном фоне свидетельствует о необходимости перезарядки патрона (см. раздел Подготовка ингалятора Novolizer® к использованию).



## Как производить чистку ингалятора Novolizer®:



1. Снимите защитный колпачок и извлеките мундштук. Для этого слегка поверните мундштук против часовой стрелки и его.



2. Поверните Novolizer® вверх дном и потяните каретку со шкалой на себя, одновременно поднимая ее.

Регулярно протирайте мундштук, каретку и корпус мягкой и сухой безворсовой тканью. Остатки аэрозоля можно удалить из ингалятора лёгким постукиванием.

## Внимание! Промывать ингалятор водой с моющими средствами нельзя.



3. Вставьте каретку в верхнее гнездо под углом и установите в исходное положение нажатием пальца.



4. Насадите мундштук пазом на штифт и поверните по часовой стрелке до фиксации.

## Как часто Вы должны пользоваться ингалятором?

Утром: \_\_\_\_\_ Вечером: \_\_\_\_\_

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
Bei Bedarf an weiteren Bedienungsanleitungen  
in Kurzform bitte die beigefügte Antwortkarte  
ausfüllen und an uns zurücksenden.

**MEDA**

Bitte hier abtrennen

Ich möchte den Abreißblock  
„Bedienungsanleitung für den  
Novolizer® von MEDA“  
nachbestellen.

Bitte  
freimachen



Absender/Stempel

Antwort

**MEDA Pharma GmbH & Co. KG**  
**Marketing & Sales Deutschland**  
**Novolizer Team**  
**Benzstraße 1**  
**61352 Bad Homburg**